

بیمارستان شهید آیت اله دستغیب
چک لیست سرنگ پمپ SINO MED

تاریخ تکمیل:

نام بخش:

خیر	بلی	عنوان
		۱- نحوه خاموش و روشن کردن دستگاه را می داند؟
		۲- از تنظیم میزان تزریق (بصورت صحیح و اعشار) آگاهی دارد؟ (استفاده از کلیدهای
		۳- از عملکرد دکمه start و pause آگاهی دارد؟ (شروع و توقف تزریق)
		۴- از نحوه مشاهده حجم تزریق شده به بیمار و صفر کردن حجم تزریق شده آگاهی دارد؟ (استفاده از دکمه Delivery، استفاده همزمان از دکمه Delivery و Silence)
		۵- از نحوه استفاده از دکمه purge و عملکرد آن در زمان توقف و تزریق آگاهی دارد؟ (۲ بار فشردن و نگاه داشتن دکمه مورد نظر در صورت متوقف بودن دستگاه حجم داروی تزریق شده در حجم کلی محاسبه نمیشود، اما در حالت تزریق این حجم محاسبه می گردد.)
		۶- نحوه تنظیم حجم نهایی تزریق (volume limit) را می داند؟ (یکبار فشردن دکمه select)
		۷- نحوه تعیین میزان فشار انسداد مسیر (occlusion limit (H-C-L)) را می داند؟ (دو بار فشردن دکمه select)
		۸- انواع آلارم های دستگاه را می شناسد؟ (occlusion- near empty- finish)
		۹- جهت بی صدا کردن آلارم ها به مدت کوتاه از دکمه silence استفاده می نماید؟
		۱۰- نحوه جایگذاری سرنگ و extension tube را می داند؟

نام و امضاء ارزیابی کننده:

نام و امضاء ارزیابی شونده:

آخرین بازنگری بهار ۱۴۰۱

