



بیمارستان شهید آیت اله دستغیب

آمبویگ

شماره سند: TH-SO-CH-22-01

تاریخ تکمیل:

نام بخش:

عنوان	بلی	خیر	ملاحظات
۱- وضعیت ظاهری آمبویگ (سالم بودن دریچه فشار، پارگی یا پوسیدگی بگ) را چک می کند؟			
۲- محل اتصال کاتتر اکسیژن به آمبو را چک می کند؟			
۳- طریقه بررسی آمبو از نظر نشتی را می داند؟ (خروجی آمبو را بادست خود مسدود کرده و با دست دیگر بگ را پمپ می کند که در اینصورت نباید نشتی داشته باشد.)			
۴- تست safty valve (دریچه تنظیم فشار) را انجام می دهد؟ (ابتدا دریچه تنظیم فشار را بسته، سپس بگ را پمپ می کنیم که در این صورت نباید نشتی از valve یا بگ داشته باشیم.)			
۵- از سالم بودن کیسه ذخیره اکسیژن و اتصال آن به آمبو اطمینان حاصل می نماید؟			
۶- از نحوه انتخاب ماسک مناسب با بیمار اطلاع دارد؟			
۷- طریقه شستشو و ضد عفونی آن را می داند؟ (شناور بودن در محلول سطح بالا بعد از استفاده و هر هفته یک بار در صورت عدم استفاده)			

نام و امضاء ارزیابی شونده

نام و امضاء ارزیابی کننده

آخرین بازنگری: بهار ۱۴۰۱

