



بیمارستان شهید آیت اله دستغیب
چک لیست کار با دستگاه گلوکومتر

شماره سند: TH-SO-CH-27-01

تاریخ تکمیل:

نام بخشی:

عنوان	بلی	خیر	ملاحظات
۱- پرستار دست ها را قبل از شروع به کار می شوید؟			
۲- وسایل مورد نیاز را آماده می نماید؟ (پنبه الکل / دستگاه گلوکومتر / نیدل یا لنست)			
۳- آیا دستگاه از نظر وضعیت ظاهری (شکستگی) سالم و تمیز می باشد؟			
۴- قبل از انجام پروسیجر به بیمار (همراه بیمار) توضیحات لازم را می دهد؟			
۵- آیا نوار تست را درون دستگاه قرار میدهد تا نشانگر چکاندن قطره نمایان شود			
۶- محل مناسب ورود نیدل (نوک انگشت بیمار) را می داند؟			
۷- نکات استریلیتی (محل را با پنبه الکل ضد عفونی میکند) را رعایت می کند؟			
۸- آیا لنست را سریع و عمود در محل مناسب میزند؟			
۹- آیا از اغشته شدن میزان کافی خون به نوار تست اطمینان حاصل میکند؟			
۱۰- پس از رویت نتیجه تست نوار را در سطل عفونی دفع میکند؟			
۱۱- نتیجه تست را به پزشک و مددجو اطلاع می دهد؟			
۱۲- نتیجه را در پرونده ثبت می کند؟			
۱۳- پس از استفاده، دستگاه را از نظر وجود قطره خون بررسی و قبل از استفاده مجدد آن را ضد عفونی و تمیز می نماید؟			

نام و وامضاء ارزیابی شونده

نام و وامضاء ارزیابی کننده

آخرین بازنگری: بهار ۱۴۰۱

